

Gel Sbiancante – “INLINE Whitening Gel”

L'innovativo gel “**Inline Whitening Gel**” appositamente studiato di colorazione rossa, è riservato ad un uso professionale per lo sbiancamento dei denti vitali. Per evitare o minimizzare gli effetti sulla struttura dentale, il prodotto ha un Ph nella fascia di 6.0 a 7.0 (considerato neutro).

Gli sbiancanti a base di perossido d'idrogeno al 35-38%, devono essere utilizzati esclusivamente negli studi dentistici sotto controllo di personale specializzato, sempre con l'utilizzo di un efficace isolamento per la protezione dei tessuti.

La durata del risultato dello sbiancamento varia da paziente a paziente, se viene eseguito lo sbiancamento professionale, abbinato ad una buona igiene orale dopo il consumo di cibi o bevande macchianti, si può mantenere un sorriso più bianco per un prolungato periodo.

Il sistema **inline** di sbiancamento è sicuro, non modifica e non danneggia la struttura dei denti, comporta l'uso combinato dell'apparecchio B-Light o Thee Light Plus a luce fredda e dello specifico gel di perossido d'idrogeno che permette di ottenere, in brevissimo tempo, un completo ed efficace sbiancamento simultaneo delle arcate dentarie. Attivando lo specifico gel, tramite emissione della luce Led, si ottiene un rilascio di radicali liberi di ossigeno che agiscono ossidando le molecole dei pigmenti che causano le macchie, facendo sì che i denti riprendano un colore più chiaro e brillante.

Comunque è importante osservare che si tratta di un prodotto altamente sbiancante, che può essere utilizzato non solo con lo specifico sistema B-Light a luce fredda, ma anche con altri tipi di fonti di luce esistenti in commercio.